

Q&A

よくお問い合わせいただく内容です。
その他にも不明点などございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Q なぜ排泄物が消えるのですか？

A 微生物が排泄物やトイレトーパーを、
水蒸気と炭酸ガスに分解するためです。
[あすなろ]は1日約2,000cc分解するこ
とができるポータブルトイレです。

Q 臭いはしないのですか？

A 臭気成分であるアンモニアやメタンなど
を、バイオが分解するので、不快におい
は抑制されます。また、外に排気する
方法として、外付け(オプション)が必要
ですが、外付けのための排気工事は必要
ありません。

Q トイレトーパーは使えますか？

A はい。ご使用いただけます。市販の物で、
色、柄、香りが無い、「抗菌剤不使用」の
トイレトーパーをご使用ください。
※ティッシュペーパーや除菌クリーナー類はバイオ
菌が死滅する恐れがあるため、槽の中には絶対
に入れないでください。

Q バイオチップは捨てたり、交換 する必要はありますか？

A 通常はバイオ菌が繁殖し続けるため、半
永久的に破棄や交換の必要はありません。
死滅した場合は、チップの交換が必要
になりますので、販売店でお買い求めく
ださい。(13ℓ 5,775円)
※除菌剤等の使用により、バイオ菌が死滅する可
能性があります。

Q 薬、下剤等を使用しても大丈夫？

A 座薬や浣腸を服用されている方もご使
用いただけますが、嘔吐物にはご使用い
ただけません。
※槽の中へ直接「薬物」の投入もお控えください。

Q トイレのお手入れ方法は？

A 便座や木部などを拭いていただければ
大丈夫です。
※便座と便座クッションは取り外しが可能なので
水洗いも可能です。

バイオの力で排泄物を分解！ご本人はもちろん 介護の方の負担を心身ともに軽くしてくれます。

本人も、周りもとっても楽になりました！




●排泄物を片付けてもらう
気持の負担が無くなったよ。
●自力で排便できるように
なりました！



●大変なトイレの後片付けが
だんぜん楽になったわ。
●外へ排気するんでお部屋の
ニオイも気にならないんです。

分解のメカニズム

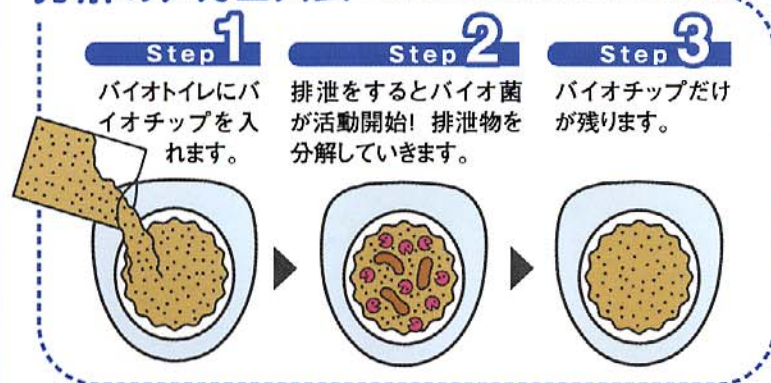

初めてご使用いただく際は、 前日より菌を促す(立上)作業が必要です

- 1 槽の中にチップを規定量(24ℓ)線まで入れる
- 2 槽にミネラルウォーターを入れ24時間攪拌させる
- 3 便座と座面クッションを降ろす
- 4 便座と座面クッションを降ろしたまま、一日使用を控える

※立上作業のみミネラルウォーターを使用しますが、立上以外は水道水も可能
です。
※準備運転中は絶対に電源をoffにしないでください。
※座面クッションを上げてしまうと安全装置により運転が停止しますので座面ク
ッションを上げないでください。



YC-25B

介護保険対象

介護保険では要支援要介護の認定がされて
いれば償還払いでお買い求めいただけます。
詳細はケアマネージャーさんにご相談ください。

特長 1


自動で攪拌！ ニオイを閉じこめる！



ふたを閉めると
攪拌が始まり、
排泄物がチッ
プの中に沈み
込むことで、分解が行
われます。

特長 2

便座、肘掛けなど、 豊富な高さに調整可能

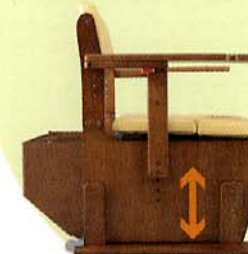

肘掛けの高さが5
段階、便座面が4
段階に調整可能。
使う人の高さに合
わせて、座りやす
さを追求した安心
設計。

特長 3

キャスター付きだから 移動もらくらく！



キャスター付きだ
からスムーズな
移動が可能。

特長 4

どんなお部屋にも マッチするデザイン！



木製の家具調デザ
インはトイレに見え
ないので、イスとし
ても使えます。